

# Sehnenplatzhalter



## Tendon Spacer, oval (Silastic-Stab)

### Sehnenplatzhalter (oval) nach Swanson-Hunter



Der Sehnenplatzhalter nach Swanson-Hunter ist ein Hilfsmittel, das vorübergehend implantiert, die zweiseitig durchgeführte Rekonstruktion der Handbeuge- und Handstrecksehnen erleichtert. Der sterile Sehnenplatzhalter ist 24 cm lang und hat einen ovalen Querschnitt. Er ist in vier verschiedenen Größen erhältlich und wird aus Hochleistungs-Silikonelastomer in medizinischer Qualität hergestellt, mit einem geringen Anteil Bariumsulfat, um den Platzhalter röntgenkontrastfähig zu machen. In Phase I wird der Platzhalter in das entsprechend rekonstruierte Sehnenlager eingelegt und an der distalen Phalanx befestigt; das proximale Ende bleibt frei auf der Handfläche oder auf dem Unterarm. Die zweite Operationsphase erfolgt in der Regel sechs Monate nach dem ersten Eingriff, nachdem sich eine ausreichende Pseudosehnen Scheide um

den Platzhalter gebildet hat und das Handgelenk weich und geschmeidig ist. In Phase II wird dann ein permanentes Sehnenautograft am Platzhalter befestigt und durch die Pseudosehnen Scheide gezogen, wobei der Platzhalter entfernt wird. Spezifische Indikationen: Rekonstruktion der Beuge- und Strecksehnen der Finger, des Daumens und des Handgelenks. Vernarbungen oder Sehnenverwachsungen nach einem Trauma oder mißlungener Erstoperation, Fehlen der Sehnen Scheide, Vernarbungen oder Verwachsungen an funktionsgestörten Sehnenrollen.

Kat.-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
2427-0003	Länge: 24 cm, Breite: 3 mm, Höhe: 1,5 mm	1 Stück
2427-0004	Länge: 24 cm, Breite: 4 mm, Höhe: 2 mm	1 Stück
2427-0005	Länge: 24 cm, Breite: 5 mm, Höhe: 2,5 mm	1 Stück
2427-0006	Länge: 24 cm, Breite: 6 mm, Höhe: 3 mm	1 Stück
2437-0001	Größenbestimmungssatz, unsteril (nicht zur Implantation geeignet) je ein Stück Größe 3 bis 6	1 Satz

**Hersteller:**  
WMT Wright Medical Technology Inc.  
Memphis, TN 38117  
USA

CE 0086

**Vertrieb in Deutschland:**  
AMT Aromando Medizintechnik GmbH  
Kasernenstr. 21 40213 Düsseldorf  
Tel. 0211 / 862 999 0  
Email: info@amt-med.de

