



Narbentherapie mit Silicon-Gel

Silgel® fluidartiger, hauchdünner Film

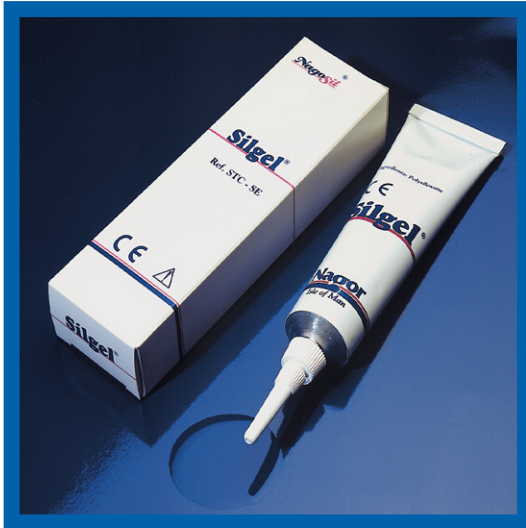

Anwendungs- beispiel für Silgel®

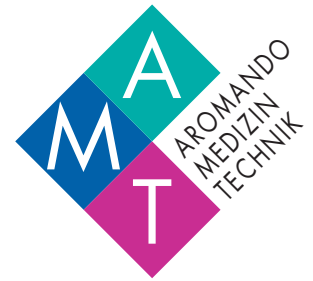

Narben bilden sich als Folge von Verbrennungen, Verbrühungen, Traumen oder chirurgischen Eingriffen.

Silgel® wurde entwickelt, um ein einfach anwendbares Mittel zur Prophylaxe und Behandlung von hypertrophen Narben und Keloiden verfügbar zu haben. Die Anwendung von Silgel® ist insbesondere dort angezeigt, wo sich Silicon Gel-Folie schwierig fixieren läßt, z. B. im Bereich der Hände und Gelenke, oder wo sie optisch stört, z. B. im Gesichtsbereich und für großflächige Hautareale.

Silgel® besteht aus klarem hochmolekularem Polysiloxan. Klinische Erfahrungen lassen darauf schließen, daß Silgel® das Erscheinungsbild von Narben positiv verändern kann.

Mit Silgel® steht ein Präparat zur Verfügung, das einfach vom Patienten selbst angewendet werden kann. Es wird zweimal täglich in hauchdünner Schicht auf das zu behandelnde Hautareal aufgetragen und leicht einmassiert. Durch seine fluidartige Konsistenz kann Silgel® insbesondere auch auf empfindlichen Hautpartien problemlos appliziert werden.

Silgel® bildet einen unsichtbaren Film, der wasserabweisend und luftdurchlässig ist und die Anwendung von Kosmetika erlaubt. Jeweils vor dem Auftragen ist das betroffene Hautareal unter Verwendung einer pH-neutralen Waschlotion gründlich zu reinigen und zu trocknen.

Silgel® ist nur für die äußerliche Anwendung auf epithelisierter Haut bestimmt. Die Anwendung auf offenen Wunden, infizierter Haut, Schleimhäuten, bei Wundheilungsstörungen und im Augenbereich ist kontraindiziert.

Bei regelmäßiger Anwendung von Silgel® über mehrere Monate können deutliche Verbesserungen erreicht werden: Verblässen der Rötung, Abflachung der Narbe, Verschwinden des Juckreizes, höhere Flexibilität bei Kontrakturen.

Diese Informationen sind ausschließlich für die medizinischen Fachkreise bestimmt, nicht für Patienten. Rev. SCTH001-2007

Silgel® wird in Deutschland von der AMT Aromando Medizintechnik GmbH, Düsseldorf, vertrieben und angeboten in der Packungsgröße:

Größe	VE	Katalog-Nr.	PZN
Tube à 20 ml	1 Stück	STC-SE	1289103

Literaturhinweise zur Narbenbehandlung mit Silicon-Gel

Y. Sawada, K. Sone: „Treatment of scars and keloids with a cream containing silicone oil“
British Journal of Plastic Surgery 1990/43, P. 683-688

Y. Sawada, K. Sone: „Beneficial effects of silicone cream on grafted skin“
British Journal of Plastic Surgery 1992/45, P. 105-108

**AMT Aromando
Medizintechnik
GmbH**



Kasernenstraße 21
D-40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 862 999-0
Telefax: 0211 / 862 999-29
E-Mail: info@amt-med.de
www.amt-med.de