

Sehnenplatzhalter



Tendon Spacer, oval und rund

Sehnenplatzhalter (oval) nach Swanson-Hunter



Der Sehnenplatzhalter nach Swanson-Hunter ist ein Hilfsmittel, das vorübergehend implantiert, die zweiseitig durchgeführte Rekonstruktion der Handbeuge- und Handstrecksehnen erleichtert. Der sterile Sehnenplatzhalter ist 24 cm lang und hat einen ovalen Querschnitt. Er ist in vier verschiedenen Größen erhältlich und wird aus Hochleistungs-Silikonelastomer in medizinischer Qualität hergestellt, mit einem geringen Anteil Bariumsulfat, um den Platzhalter röntgenkontrastfähig zu machen. In Phase I wird der Platzhalter in das entsprechend rekonstruierte Sehnenlager eingelegt und an der distalen Phalanx befestigt; das proximale Ende bleibt frei auf der Handfläche oder auf dem Unterarm. Die zweite Operationsphase erfolgt in der Regel sechs Monate nach dem ersten Eingriff, nachdem sich eine ausreichende Pseudosehnen Scheide um

den Platzhalter gebildet hat und das Handgelenk weich und geschmeidig ist. In Phase II wird dann ein permanentes Sehnenautograft am Platzhalter befestigt und durch die Pseudosehnen Scheide gezogen, wobei der Platzhalter entfernt wird. Spezifische Indikationen: Rekonstruktion der Beuge- und Strecksehnen der Finger, des Daumens und des Handgelenks. Vernarbungen oder Sehnenverwachsungen nach einem Trauma oder mißlungener Erstoperation, Fehlen der Sehnen Scheide, Vernarbungen oder Verwachsungen an funktionsgestörten Sehnenrollen.

Kat.-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
2427-0003	Länge: 24 cm, Breite: 3 mm, Höhe: 1,5 mm	1 Stück
2427-0004	Länge: 24 cm, Breite: 4 mm, Höhe: 2 mm	1 Stück
2427-0005	Länge: 24 cm, Breite: 5 mm, Höhe: 2,5 mm	1 Stück
2427-0006	Länge: 24 cm, Breite: 6 mm, Höhe: 3 mm	1 Stück
2437-0001	Größenbestimmungssatz, unsteril (nicht zur Implantation geeignet) je ein Stück Größe 3 bis 6	1 Satz

Sehnenplatzhalter (rund)



Ein weicher, aus medizinisch reinem Silikonelastomer hergestellter Stab für wiederherstellende chirurgische Operationen. Der Stab ist vorübergehend für die Bildung neuer Sehnen Scheiden, bei Netzhautablösungen und andere wiederherstellende Operationen geeignet.

Kat.-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
NA 515-1	Länge: 30 cm, Ø: 1 mm	1 Stück
NA 515-2	Länge: 30 cm, Ø: 2 mm	1 Stück
NA 515-3	Länge: 30 cm, Ø: 3 mm	1 Stück
NA 515-4	Länge: 30 cm, Ø: 4 mm	1 Stück
NA 515-5	Länge: 30 cm, Ø: 5 mm	1 Stück
NA 515-6	Länge: 30 cm, Ø: 6 mm	1 Stück
NA 515-7	Länge: 30 cm, Ø: 7 mm	1 Stück

Hersteller:

ovale Ausführung: WMT Wright Medical
Technology Inc., Memphis, TN 38117, USA
runde Ausführung: Nagor Ltd.,
Cumbernauld, Glasgow G68 9HN, UK





Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Kasernenstr. 21 40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de



Universal Tendon Spacer

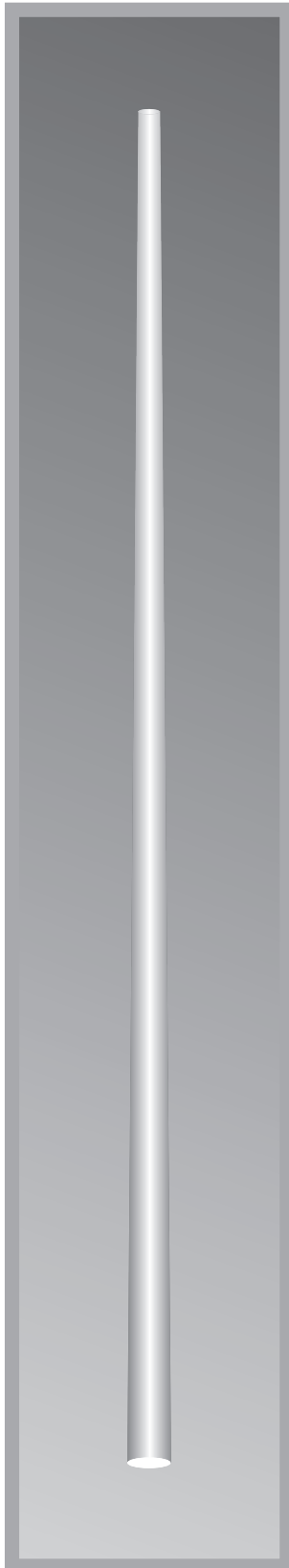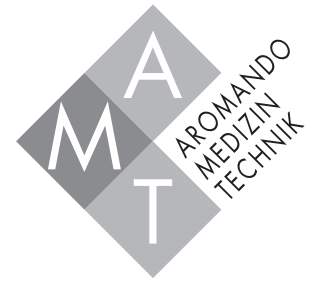

Reconstruction of Flexor or Extensor tendons of the fingers, thumb and wrist

Characteristics:

- The Universal Tendon Spacer design makes sure that most of the space allowed by the digital canal will be utilized, thus the greatest possible pseudosheath will be obtained.
- The Universal Tendon Spacer can also be used as a physical support to reconstruct the digital canal.
- The Universal Tendon Spacer is made out of High Performance silicone elastomer. It contains a small amount of Bariumsulfate for X-ray viewing.
- The Universal Tendon smooth surface will induce the appearance of a pseudosheath, and in a second step surgery (2 to 6 months later) an active permanent tendon autograft is implanted.

Dimensions (4 tendon spacers in one)


Length: 49,5 cm

Smaller diameter (B)

equals always half of larger diameter (A)

Diameter A	on a Length of	Diameter B
6 mm – 6 mm	19 cm	3,0 mm
6 mm – 5 mm	8 cm	2,5 mm
5 mm – 4 mm	8 cm	2,0 mm
4 mm – 3 mm	8 cm	1,5 mm
3 mm – 3 mm	6 cm	1,5 mm

*The scale of the drawing is
1:1 for the width and
1: ≈2,5 for the length.*

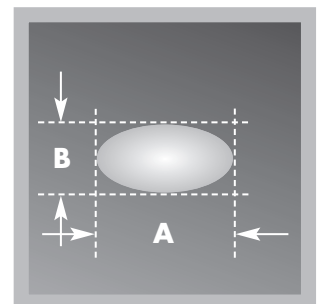

**Exclusive Distributor
for Germany:**



**AMT Aromando
Medizintechnik GmbH**

Kasernenstraße 21
D-40213 Düsseldorf

Telefon:
0211 / 862 999-0

Telefax:
0211 / 862 999-29

eMail:
AMT-Duesseldorf@t-online.de