



Metacarpalfraktur: Fall von Dr. Philippe Liverneux, Rochefort-sur-Mer, Frankreich

CHIROBLOC® besteht aus zwei Teilen

Die CHIROBLOC®-Hand wird hergestellt aus einer Metallegierung mit Silicon-Ummantelung, sie wiegt 0,5 kg und verhält sich wie eine „Bleihand“.

Der CHIROBLOC®-Ballast kann bei Bedarf angefügt werden, um die Hand schwerer zu machen. Er besteht aus rostfreiem Edelstahl und hat ein Gewicht von 0,725 kg.

CHIROBLOC® ist ein Produkt der Firma AREX®, Palaiseau, Frankreich.

Reinigen und Sterilisieren


Die CHIROBLOC®-Hand besteht aus einer Materialzusammensetzung, die garantiert bleifrei ist. Sie kann problemlos wiederholt sterilisiert werden.

Genauere Informationen zur Aufbereitung entsprechend DIN EN ISO 17664:2004 und den RKI-Richtlinien sind den speziellen Anleitungen zu entnehmen.

Prinzipiell werden die CHIROBLOC®-Hand und ihr Ballast genauso behandelt wie andere chirurgische Instrumente. Allerdings gibt es bei der CHIROBLOC®-Hand eine Besonderheit: Nach dem Reinigen wird die CHIROBLOC®-Hand geglättet. Durch wiederholte Benutzung ist sie eventuell nicht flach genug, um noch in die rostfreie Edelstahlplatte (den Ballast) zu passen. In diesem Fall wird die CHIROBLOC®-Hand auf hartem Untergrund mit einem Hammer geglättet.

Hinweis zur Produktpflege

Die CHIROBLOC®-Hand ist ein chirurgisches Instrument und wie ein solches pfleglich zu behandeln. Insbesondere häufiges, kurz aufeinander folgendes hin- und herbiegen der „Finger“ kann zu vorzeitiger Materialermüdung führen und die Lebensdauer des Produktes verkürzen. Eine solche, unzureichende Behandlung stellt keinen Reklamationsgrund dar und verpflichtet nicht zu Garantieleistungen. - Die Herstellergarantie für das Produkt beträgt ein Jahr.

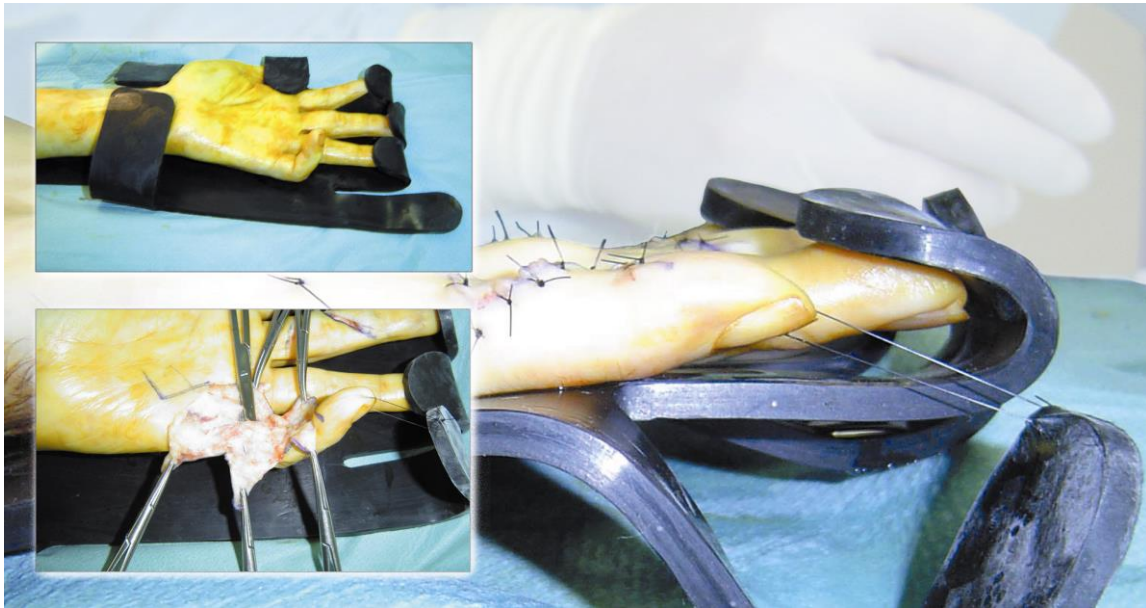

Dupuytren'sche Krankheit: Fall von Dr. Stéphane Barbery, Frankreich

- Fixierung der Hand in der für den Eingriff erforderlichen Lage
- unsichtbar im Röntgenbild: keine Zeitverluste mehr durch An- und Ablegen der Bleihand
- keine Verfärbungen mehr durch Blei in den Waschmaschinen des Steri
- erhältlich in zwei Größen: groß und klein
- garantiert bleifrei und latexfrei



Größe klein



- staubabweisende Oberfläche

Referenznummern für Bestellung:

CBM	Größe ‚groß‘ ohne Ballast
CBM/CBL	Größe ‚groß‘ mit Ballast
CBP	Größe ‚klein‘ ohne Ballast
CBP/CBL	Größe ‚klein‘ mit Ballast

Hersteller:
AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91120 Palaiseau, Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:
AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14913 Luckenwalde
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

