

ULRICH AG
Mövenstrasse 12
CH-9015 St. Gallen

ULRICH AG

Medical Adhesive B Liquid
VM 355
(PZN: 0255823)

CE
Lot 84518 Exp. 11/2002

Beschreibung

Medical Adhesive B Liquid ist ein druckempfindlicher medizinischer Klebstoff. Er ist besonders geeignet, verschiedene Materialien temporär an der Körperoberfläche zu befestigen. Dieser medizinische Klebstoff bietet folgende Vorteile:

- Er behält seine Klebeeigenschaften bei, auch wenn er mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt
- Seine Klebeeigenschaften bleiben von physiologischen Temperaturschwankungen unbeeinflusst
- Seine Klebeeigenschaften verringern sich auch über lange Zeiträume hinweg nicht

Vorschläge zur Verwendung

Medical Adhesive B Liquid wird als nicht sensibilisierendes Klebematerial verwendet, um Verbände, Prothesen oder andere Gegenstände aus Metall oder Kunststoff am Körper zu befestigen.

Gebrauchsanleitung

Beide Klebeflächen (trocken und fettfrei) gleichmässig mit dem Klebstoff bestreichen. Wenn berührtrocken, die Klebeflächen unter Druck zusammenfügen. Zusätzliche Schichten von Klebstoff können die Klebfestigkeit erhöhen.

Entfernen des Klebstoffes

Medical Adhesive B Liquid kann mit Isopropanolalkohol oder Wundbenzin entfernt werden.

Lagerung und Haltbarkeitsdauer

Medical Adhesive B Liquid ist 48 Monate haltbar, sofern die Lagerung in fest verschlossenen Behältern bei 25°C oder niedrigeren Temperaturen erfolgt.

Toxikologie

Medical Adhesive B Liquid wurde auf Augenreizung und primäre Hautreizung geprüft. Er wurde als untoxisch, nicht augen- oder hautreizend befunden. Weitere Informationen zur Toxikologie dieses Materials können unserer Produktinformation entnommen werden.

Warnung

Medical Adhesive B Liquid enthält als Lösungsmittel Ethylacetat, das zu Augenreizungen führen kann. Deshalb Augenkontakt vermeiden. Das Lösungsmittel kann eine Reizung der Atemwege verursachen. Deshalb längeres und tiefes Einatmen vermeiden und für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen.

Das Lösungsmittel ist leichtentzündlich. Medical Adhesive B Liquid deshalb nicht in der Nähe von offenem Feuer anwenden und von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Wichtiger Hinweis

Die hier aufgeführten Informationen und Daten basieren auf Informationen, die wir für zuverlässig erachten. Sie sollten jedoch jeden Gebrauchszweck gründlich testen und unabhängig entscheiden, ob unser Produkt Ihren Anforderungen entspricht.

Vertrieb in Deutschland: A M T Medizintechnik GmbH, Galmer Str. 14, D-14943 Luckenwalde
Tel.: 03371 / 61 94 58 - Fax : 03371 / 61 94 59