


ForgetMeNot®



Wiederverwendbares Finger-Tourniquet

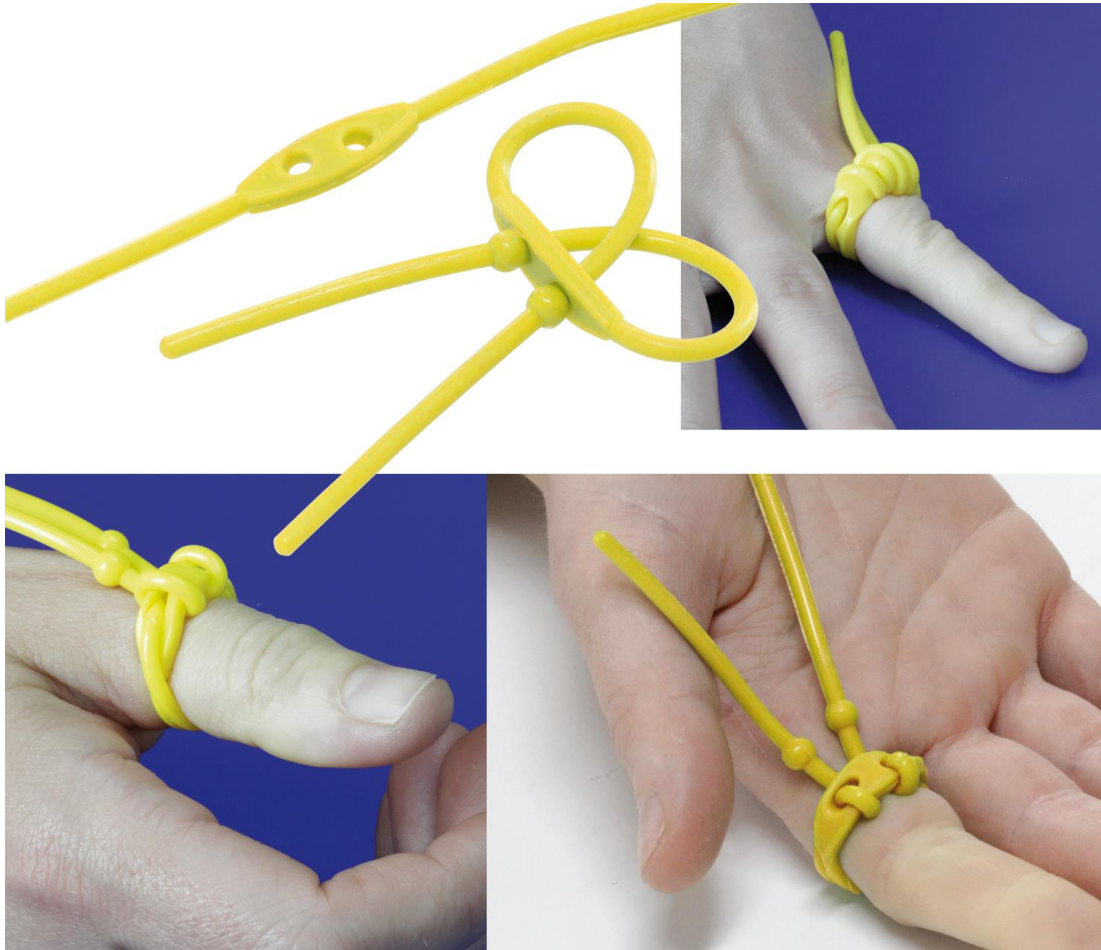

ForgetMeNot® wurde speziell als Finger-Tourniquet entwickelt. Es zeichnet sich aus durch:

- Wiederverwendbarkeit
- Universalgröße
- Erreichen völliger Blutleere
- Auffällige Farbgebung, damit es postoperativ nicht übersehen wird
- leichtes Entfernen (kein erneutes Rollen über die Wunde notwendig)
- Umweltfreundlichkeit, da wiederverwendbar

Bestellnummern:

FMN2B.B
FMN2B.Y

ForgetMeNot®, blau
ForgetMeNot®, gelb

1 VE à 10 Stück
1 VE à 10 Stück

Hersteller:

AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91120 Palaiseau
Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de



Gebrauchsanweisung

Für die korrekte Anwendung sind nachstehende Instruktionen zu befolgen. - Das ForgetMeNot® Finger-Tourniquet wird unter örtlicher (LA) oder locoregionaler (LRA) Anästhesie angewandt.



1.) Vor dem Platzieren wird das Tourniquet wie folgt präpariert: Man formt eine oder zwei Schlaufen, indem man einen, oder besser beide Stränge durch die Öffnungen im Mittelstück zieht.



2.) Dann wird das Tourniquet auf der Fingerspitze aufgesetzt und durch Ziehen an beiden Strängen festgezogen.

3.) Um den Zustand der Blutleere zu erreichen, wird nun das Tourniquet bis zur Fingerbasis heruntergerollt.

Falls das Tourniquet sich dabei nicht um sich selbst wickeln sollte und nur den Finger heruntergleitet, ist die Straffheit des Tourniquets nicht gewährleistet. Es muß sich um sich selbst herumwickeln.



4.) -



5.) Der chirurgische Eingriff kann jetzt beginnen.



6.) Das Entfernen des Tourniquets ist einfach: Am Mittelstück ziehen und so das Tourniquet lockern und entfernen. Es kann resterilisiert und danach wiederverwendet werden.

Ist vollständige Blutleere nicht erforderlich, genügt auch eine einzelne Schlaufe. Dazu wird der Arm für ein paar Minuten über Herzhöhe gehalten und ForgetMeNot® direkt an der Fingerbasis angebracht.

NB1: ForgetMeNot® nicht auf kleinen Fingern und in pädiatrischen Fällen verwenden.

NB2: FMN nicht zusätzlich mit Metallklammern fixieren. Das Silicon könnte beschädigt werden.

Hersteller:
AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91120 Palaiseau
Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:
AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

