

MEDICAL ADHESIVE B SPRAY

Pharmazentralnummer 0255846

Nicht allergen

Druckempfindlich

Silikon Kleber

VORSICHT

Dose steht unter Druck. Vor Sonnenlicht und Erwärmung auf über 50° Celsius schützen. Dose nicht beschädigen oder verbrennen, auch nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Verwendung gemäß Vorschrift. Absichtlicher Mißbrauch wie vorsätzliche Inhalation des Inhaltes kann schädlich oder tödlich sein. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Nicht auf einmal leeren. Nicht rauchen.

INHALT

Adhäsives (Klebendes), druckempfindliches Polysiloxan-Polymer mit Butan als Treibgas.

Gebrauch

- Kleber für Ileostomie und Kolostomie Versorgungen.
- Kleber für maxillo-faziale Prothesen
- Kleber für Gazen, Verbände und Pflaster
- Klebendes Medium zwischen Pflaster und Haut um Irritationen zu verhindern

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut schütteln. Spraydose nahe an Oberfläche halten oder direkt auf die Stelle sprühen, wo Haftung gewünscht wird. Kleber nach 60 Sekunden bereit. Zusätzliche Schichten erhöhen den Klebeeffekt. Kleber kann mit Wundalkohol von Haut, Prothesen und Versorgungen entfernt werden.

ACHTUNG: Bei maxillo-fazialer Verwendung nur auf die Prothesen versprühen.

Hersteller:

Ulrich AG

Mövenstr. 12

CH-9015 St. Gallen, Schweiz

Vertrieb in Deutschland:

A M T Medizintechnik GmbH

Galmer Str. 14

D-14943 Luckenwalde