

Cimeosil® Gel Folie

FÜR DIE BEHANDLUNG VON KELOIDEN, HYPERTROPHEN NARBEN UND DAMIT
VERBUNDENEM ERYTHEMA

- Selbsthaftend
- Einfach in der Anwendung
- Bequem
- Kein Verband nötig
- Waschbar und wiederzuverwenden
- Nicht hautirritierend

Indikationen zur Anwendung:

Cimeosil Gel Folie ist eine selbsthaftende Silikon- Polymer-Verbindung für die spezielle Behandlung von Keloiden und hypertrophen Narben, die durch traumatische Verletzungen oder Verbrennungen der Haut entstanden sind.

Anleitung:

Den Hautbereich mit mildem Seifenwasser waschen und trocken tupfen. Die Folie aus der Plastikpackung nehmen und ein Stück abschneiden, das etwas größer ist als der zu behandelnde Bereich, damit die ganze Narbe gut bedeckt ist. Bei besonders geschnittenen Folien ist es nicht nötig, das Blatt zu schneiden, bevor es auf die Narbe gelegt wird. Den Plastikbelag von beiden Seiten der Folie entfernen und die klebrige Seite auf den betroffenen Hautbereich legen. Tägliche Anwendung ungefähr 8 Stunden. Je nach Alter und Tiefe der Narbe, wird sie nach ungefähr 7 bis 90 Tagen weniger auffällig. So lange anwenden, bis das gewünschte Resultat erreicht ist. Die Folie kann durch Spülen mit Wasser gesäubert werden und muss vor einem neuen Gebrauch vollkommen trocken sein. Die Folie ist in einem gut verschlossenen Beutel aufzubewahren.

VORSICHT:

Nicht auf offenen Wunden anwenden. Verändert sich die Narbe nicht, oder es treten Röte, Irritation (Ausschlag oder Entzündung) Infektion oder Mazeration (Erbleichen der Haut) auf, ist die Anwendung zu unterbrechen und ein Arzt zu Rate zu ziehen. Während der Behandlung mit der Folie dürfen Talkumpuder, Feuchtigkeitscreme, Sonnenschutzcreme oder andere topische Medikationen auf den betroffenen Hautbereich nicht aufgetragen werden. Ist die Folie nicht mehr adhärent, muss sie ausgetauscht werden.

Drying Mat [Ⓐ]

Natto Pour le Séchage
Stuoia Per Asciugarsi

Trockenunterlage
Esteira De Secagem

Estera Para La Sequedad
Tørringsunderlag

Droogmat
ΥΠΟΘΕΜΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

Instructions for Use


Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

Gebrauchsanleitung
Instrucciones para uso


Instructies voor gebruik
Brugsanvisning

Instruções de Utilização
Οδηγίες Χρήσης

I

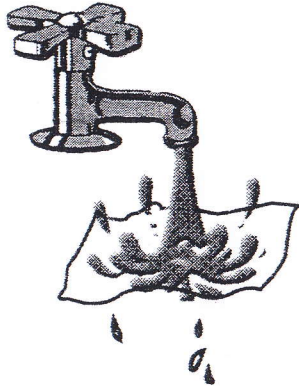

II

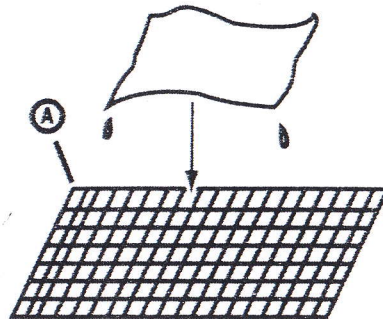

III

