


## Warum Activ'M© ?

Activ'M© Gel Folie ist eine selbsthaftende, wiederverwendbare Folie, die aus medizinischem Silikon und einem Polyurethanträger besteht und ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen.



## Hinweise zur Anwendung

- **Vor der Anwendung die Narbe gründlich reinigen und trocknen.**
- **Nehmen Sie das Produkt aus seiner Einzelverpackung.**
- **Es ist möglich, den Folie entsprechend der Narbengröße zuzuschneiden.**
- **Vergewissern Sie sich, dass die Folie die Narbe und den umliegenden Bereich vollständig bedeckt (mindestens 1/2 cm auf allen Seiten der Narbe).**
- **Ziehen Sie zunächst vorsichtig die Schutzfolie vom Produkt ab und legen Sie die Klebeseite an den Anfang der Narbe.**
- **Ziehen Sie den Rest der Schutzfolie vorsichtig ab, während Sie die Folie weiterhin auf der Narbe anbringen.**
- **Es wird empfohlen, die Narbe einmal täglich mit einer ph-neutralen Seife zu reinigen und zu trocknen.**
- **Wir empfehlen die Folie mindestens 12 Stunden am Tag zu tragen.**
- **Waschen Sie die Folie täglich mit ph-neutralen Flüssigseife. Spülen Sie diese mit klarem Wasser ab und lassen Sie diese auf einer ebenen Oberfläche trocknen.**
- **Sie können die Folie wiederverwenden, so lange die Gel-Schicht glatt, unbeschädigt und adhärent ist.**

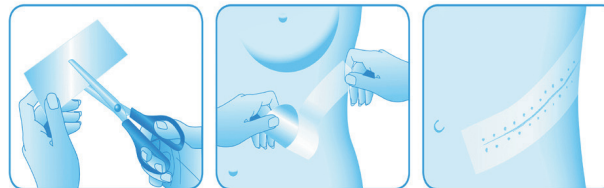

**activ'm**  
Der Narbenradierer

Silikonfolie zur medizinischen  
Narbenbehandlung,  
angereichert mit VITAMIN E

 **m technologies**

41 rue des Métissages

59335 Tourcoing FRANKREICH

[www.m-technologies-online.com](http://www.m-technologies-online.com)

[contact@m-technologies-online.com](mailto:contact@m-technologies-online.com)



Vertrieb in Deutschland durch:  
Aromando Medizintechnik GmbH  
Galmer Str.14 | D-14943 Luckenwalde  
Tel. 03371 619458  
[info@amt-med.de](mailto:info@amt-med.de) | [www.amt-med.de](http://www.amt-med.de)






Silikonfolie zur medizinischen Narbenbehandlung, angereichert mit VITAMIN E

## Anwendung von Activ'M© Folien

Activ'M© kann auf alten und neuen Narben angewendet werden, um:

- Die Ästhetik der Narben zu verbessern,
- hypertrophe Narben und Keloide zu behandeln und abzuflachen,
- die Entstehung von hypertrophen Narben und Keloiden auf frisch verschlossenen Wunden vorzubeugen.

Die Behandlung der Narben mit Activ'M© Folien reduziert auch die Rötung, den Juckreiz und die Schmerzen, die mit den Narben verbunden sind.

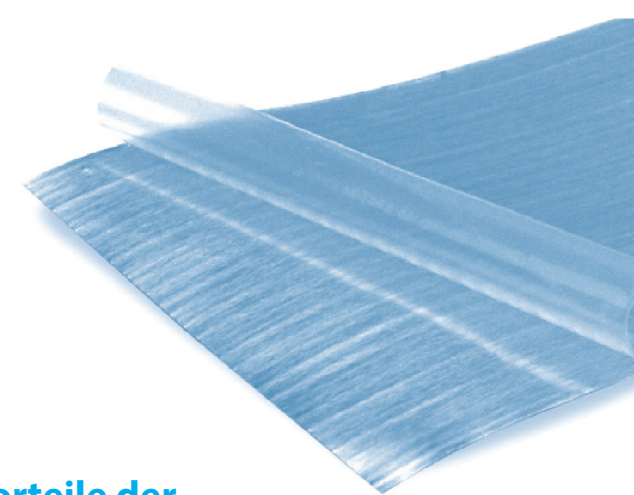

## Vorteile der Activ'M© Folien

Transparent, dünn und unsichtbar auf der Haut, Passt sich optimal an, ohne Zieheffekt, leicht zu entfernen und wieder aufzukleben, sehr sanfte Haftung auf der Haut, schmerzfreie und geruchloser Auflage.

## Dauer der Behandlung

Activ'M© ist in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Narbenform und -größe. Es wird empfohlen, die Behandlung für mindestens 2 bis 4 Monate fortzusetzen. Falls erforderlich, kann die Behandlung ein Jahr dauern.



Vorher

Nachher

Unsichtbar  
Komfortabel  
Retardierend

Schmerzfrei  
Sanfte Haftung  
Repositionierbar