

Medizinisches Silikon zur Narbenbehandlung

Die fortschrittlichen Eigenschaften des medizinischen Silikons behandeln wirksam entzündliche, hypertrophe Narben und Keloide und verbessern sichtbar ihre Ästhetik. Der Silikonfilm reagiert aktiv, indem er die Hydratation der Haut aufrechterhält und die produzierte Menge an Kollagen verringert. Diese Reorganisation der Kapillaraktivität verbessert die Ästhetik der Narbe und verringert das Risiko einer Hypertrophie. Als Ergebnis der Behandlung wird die Narbe weicher und geschmeidiger. Die intrinsischen Eigenschaften des Silikons reduzieren auch den Juckreiz und die damit verbundenen Schmerzen der Narben.



Wir machen jede Behandlung zu einem einzigartigen Erlebnis



m technologies
www.m-technologies-online.com

Medizinische
Silikonprodukte zur
Behandlung von Narben



m technologies
41 rue des Métissages
59335 Tourcoing
FRANKREICH
contact@m-technologies-online.com



Vertrieb in Deutschland durch:
Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str.14 | D-14943 Luckenwalde
Tel. 03371 619458
info@amt-med.de | www.amt-med.de



m technologies

Narbenbildung ist Teil des Wundheilungsprozesses

Die Narbe ist eine mehr oder weniger tiefe Verletzung der Dermis; sie ist das natürliche Ergebnis des Wiederherstellungsprozesses des Gewebes nach einem Hauttrauma, einer Wunde oder einem chirurgischen Eingriff. Unabhängig von der Fähigkeit der Haut, nach einer Wunde zu heilen, braucht die Narbe Zeit, um zu verblassen und abzuflachen. Leider bleibt sie sichtbar und hinterlässt eine unschöne Spur auf der Haut.

In bestimmten Fällen entwickelt sich die Narbe abnormal und kann zu einem echten Handicap für den Patienten werden. Wir unterscheiden insbesondere zwei Fälle von häufig auftretenden Komplikationen:

- **Hypertrophe Narbe:** weist erhebliche Wucherungen auf und braucht länger als eine normale Narbe, um ihre volle Reife zu erreichen. Nach zwei oder drei Monaten erreicht die Narbe ihren Höhepunkt und erzeugt ein übermäßiges Erythem mit abnormalem Juckreiz und Dicke.
- **Die Keloidnarbe** ist eine noch erheblichere Degeneration der Narbe. Der Grad des Juckreizes und des Erythems ist auf dem Höhepunkt genauso hoch wie bei einer hypertrophen Narbe, hält aber länger an. Diese Art von Narbe bildet sich ohne Behandlung nicht zurück.


Für jeden Bereich hat M-Technologies ein spezielles Präparat entwickelt

Selbst eine normale Narbe erzeugt auf verschiedenen Ebenen Juckreiz und Reizung und hinterlässt eine rote und unschöne Spur auf der Haut. M-TECHNOLOGIES hat eine Reihe von medizinischen Präparaten auf der Basis von medizinischem Silikon entwickelt, um:

- die Narben auf wirksame Weise zu behandeln,
- ihre Ästhetik zu verbessern,
- die unerwünschten Auswirkungen zu verhindern.

Narben in dehnenden Körperzonen

Die Activ'M© Gelfolie ist eine selbsthaftende, wiederverwendbare Folie, die aus medizinischem Silikon und einem Polyurethan-Träger besteht. Des Weiteren ist sie mit einer Schutzschicht versehen.

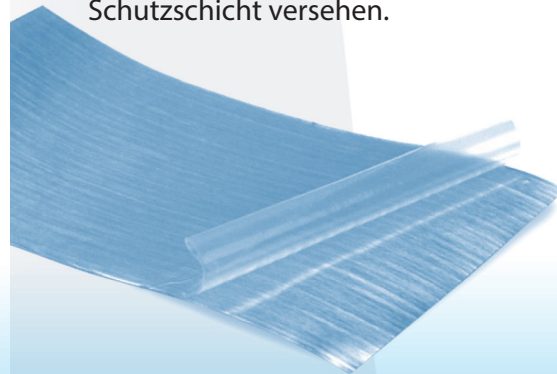

Narben, die sich an beweglichen Stellen befinden (Biegungen, Körpergelenke, Gesicht ...)

Eurogel Plus© ist ein Silikongel mit Matteeffekt, das aus einer neuen Generation von Silikonen besteht. Eurogel Plus© wird vor allem dort eingesetzt, wo ein Silikonfolie nicht leicht anzubringen ist.



Narben an sonnenexponierten Stellen (Gesicht, Hals ...)

Activ'M Gel 3in1© ist ein getöntes Silikon-Gel zur Behandlung von Narben, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Activ'M Gel 3in1© ist eine Foundation-Creme, die Unvollkommenheiten der Haut kaschiert und Ihre Narbe vor UVA- und UVB-Strahlen schützt.

