

Activ'M Gel© ist ein Silikongel mit Matteeffekt und ohne ölige Rückstände, das aus einer neuen Generation von Silikonen besteht.

Activ'M Gel© wurde zur Behandlung von entzündlichen, hypertrophen Narben und Keloiden und zur Verbesserung ihrer Ästhetik entwickelt.

Activ'M Gel© wird vor allem im Gesicht und im Bereich der Beugezonen, Körpergelenke ... verwendet, wo eine Silikonfolie nicht leicht anzubringen ist.

Nach dem Auftragen bildet Activ'M Gel© einen schützenden und unsichtbaren Film auf der Haut mit einem sofortigen seidigen Effekt.



41 rue des Métissages
59335 Tourcoing
FRANKREICH

www.m-technologies-online.com



Hergestellt in
Frankreich



Anwendungshinweise

- Vor der Anwendung die Narbe gründlich reinigen und trocknen.
- Tragen Sie das Activ'M Gel© hauchdünn direkt auf die vernarbte Stelle auf und lassen es einige Sekunden lang einziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Silikonfilm die Narbe und den umliegenden Bereich vollständig bedeckt - mindestens 1/2 cm auf allen Seiten der Narbe.
- Activ'M Gel© sollte zweimal am Tag aufgetragen werden.
- Es wird empfohlen, die Narbe einmal täglich mit einer neutralen Seife zu reinigen und zu trocknen.
- Verschließen Sie die Gel-Tube nach jeder Anwendung..
- Durch Reibung kann ein Teil des Silikonschutzfilms entfernt werden. Solange ein kleiner Teil des Silikonfilms auf der Haut verbleibt, hinterlässt er ein seidiges Gefühl auf der Haut.



Vertrieb in Deutschland durch:
Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str.14 | D-14943 Luckenwalde
Tel. 03371 619458
info@amt-med.de | www.amt-med.de



activ'
gel m



Innovatives Silikongel

Zur sichtbaren Reduzierung von Narben

m technologies

Der Narbenradierer ■ ■ ■ Hergestellt in Frankreich

SILIKONGEL OHNE ÖLIGE RÜCKSTÄNDE

ZUR SICHTBAREN RÜCKBILDUNG IHRER NARBEN

SEIDIGER TOUCH



Anwendung von Activ'M Gel©

Activ'M Gel© kann angewendet werden, um:

- Die Ästhetik der Narben zu verbessern,
- Hypertrophe Narben und Keloide zu behandeln und abzuflachen,
- Die Entstehung von hypertrophen Narben und Keloiden auf frisch verschlossenen Wunden vorzubeugen.
- Beugezonen, Körpergelenke und unbedeckte Stellen (Gesicht, Hals, ...) diskret abzudecken

Activ'M Gel© reduziert den Juckreiz und die damit verbundenen Schmerzen der Narben.

*Unsichtbar
Narbenradierer
Zweite-Haut-Effekt*

Vorteile von Activ'M Gel©

Innovatives Silikongel ohne ölige Rückstände, seidiges Gefühl, Zweite-Haut-Effekt, Bildet einen schützenden und unsichtbaren Film auf der Haut, Sehr schnell trocknend, einfach und leicht aufzutragen, anwendbar auf zarten und empfindlichen Stellen, kein Risiko der Mazeration.

Dauer der Behandlung

Es wird empfohlen, die Behandlung für mindestens 2 bis 4 Monate fortzusetzen. Falls erforderlich, kann die Behandlung ein Jahr dauern.

*Schmerzfrei
Seidiger Touch
Sanfte Haftung*