

## Vorteile von Activ'M Gel 3in1©

Activ'M Gel 3in1© wurde vor kurzem von M-Technologies in das Angebot an medizinischen Präparaten aufgenommen. Activ'M Gel 3in1© wurde entwickelt, um Narben zu behandeln, die der Sonne ausgesetzt sind.

- Schutz vor UVA- (SPF 25) und UVB-Strahlen,
- Foundation-Creme, die die Narbe verdeckt,
- Innovatives Silikongel mit Matteeft,
- Seidiges Gefühl, Zweite-Haut-Effekt,
- Sehr schnell trocknend, einfach und leicht aufzutragen,
- Anwendbar auf sonnenexponierten Körperstellen,
- Keine Gefahr der Mazeration,
- Kann zusammen mit sämtlichen Kosmetikprodukten verwendet werden.



41 rue des Métissages  
59335 Tourcoing  
FRANKREICH

[www.m-technologies-online.com](http://www.m-technologies-online.com)  
[contact@m-technologies-online.com](mailto:contact@m-technologies-online.com)



Hergestellt in  
Frankreich



## Dauer der Behandlung

Es wird empfohlen, die Behandlung für mindestens 2 bis 4 Monate fortzusetzen. Falls erforderlich, kann die Behandlung ein Jahr dauern.



Vorher

Nachher



Vertrieb in Deutschland durch:  
Aromando Medizintechnik GmbH  
Galmer Str.14 | D-14943 Luckenwalde  
Tel. 03371 619458  
[info@amt-med.de](mailto:info@amt-med.de) | [www.amt-med.de](http://www.amt-med.de)



# activ'm gel

Der Narbenradierer

## 3-in-1

Silikon-Narbenbehandlung

Perfektionierung der Haut

UV-Schutz

SPF 25



# activ' gel m



## Anwendung von Activ'M Gel 3in1©

Activ'M Gel 3in1© ist nicht nur eine Foundation-Creme mit Matteffekt, sondern kann auch verwendet werden, um:

- die Ästhetik von Narben zu verbessern,
- hypertrophe Narben und Keloide zu behandeln und abzuflachen,
- die Entstehung von hypertrophen Narben und Keloiden auf frisch verschlossenen Wunden zu verhindern,
- Unvollkommenheiten zu kaschieren (wie eine Foundation-Creme),
- die Narben vor schädlichen Sonnenstrahlen (UVA und UVB) zu schützen.

Activ'M Gel 3in1© reduziert den Juckreiz und die damit verbundenen Schmerzen der Narben.

## 3-in-1

## Anwendungshinweise

- Vor der Anwendung die Narbe gründlich reinigen und trocknen.
- Tragen Sie das Activ'M Gel 3in1© hauchdünn direkt auf die vernarbte Stelle auf und lassen es einige Sekunden lang einwirken.
- Vergewissern Sie sich, dass der Silikonfilm die Narbe und den umliegenden Bereich vollständig bedeckt (mindestens ½ cm auf allen Seiten der Norm).
- Verschließen Sie die Gel-Tube nach jeder Anwendung.

Durch Reibung kann ein Teil der Silikonschutzfolie entfernt werden. Solange ein kleiner Teil des Silikonfilms auf der Haut verbleibt, hinterlässt er auf der Haut ein seidiges Gefühl.



Silikon-Narbenbehandlung  
Perfektionierung der Haut  
UV-Schutz