



Metacarpalfaktur: Fall von Dr. Philippe Liverneaux, Rochefort-sur-Mer, Frankreich

KiroFix™ besteht aus zwei Teilen

Die KiroFix™- Hand wird hergestellt aus einer Metallgerüstung mit Silicon-Ummantelung, sie wiegt 0,5 kg und verhält sich wie eine „Bleihand“.

Der KiroFix™- Ballast kann bei Bedarf angefügt werden, um die Hand schwerer zu machen. Er besteht aus rostfreiem Edelstahl und hat ein Gewicht von 0,725 kg.

KiroFix™- ist ein Produkt der Firma ASKORN MEDICAL, Cesson Sévigné, Frankreich.

Reinigen und Sterilisieren

Die KiroFix™- Hand besteht aus einer Materialzusammensetzung, die garantiert bleifrei ist. Sie kann problemlos wiederholt sterilisiert werden.

Genauere Informationen zur Aufbereitung entsprechend DIN EN ISO 17664:2004 und den RKI-Richtlinien sind den speziellen Anleitungen zu entnehmen.

Prinzipiell werden die KiroFix™- Hand und ihr Ballast genauso behandelt wie andere chirurgische Instrumente. Allerdings gibt es bei der KiroFix™- Hand eine Besonderheit: Nach dem Reinigen wird die KiroFix™- Hand geglättet. Durch wiederholte Benutzung ist sie eventuell nicht flach genug, um noch in die rostfreie Edelstahlplatte (den Ballast) zu passen. In diesem Fall wird die KiroFix™- Hand auf hartem Untergrund mit einem Hammer geglättet.

Hinweis zur Produktpflege

Die KiroFix™- Hand ist ein chirurgisches Instrument und wie ein solches pfleglich zu behandeln. Insbesondere häufiges, kurz aufeinander folgendes hin- und herbiegen der „Finger“ kann zu vorzeitiger Materialermüdung führen und die Lebensdauer des Produktes verkürzen. Eine solche, unzureichende Behandlung stellt keinen Reklamationsgrund dar und verpflichtet nicht zu Garantieleistungen. - Die Herstellergarantie für das Produkt beträgt ein Jahr.



Dupuytren`sche Krankheit: Fall von Dr. Stéphane Barbery, Frankreich

- Fixierung der Hand in der für den Eingriff erforderlichen Lage
- unsichtbar im Röntgenbild: keine Zeitverluste mehr durch An- und Ablegen der Bleihand
- keine Verfärbungen mehr durch Blei in den Waschmaschinen des Steri
- erhältlich in zwei Größen: groß und klein
- garantiert bleifrei und latexfrei



Größe klein



- staubabweisende Oberfläche

Referenznummern für Bestellung:

- 0226 01 00 Größe ‚groß‘ ohne Ballast
- 0226 02 00 Größe ‚klein‘ ohne Ballast
- 0226 04 00 Ballast

Hersteller:
ASKORN MEDICAL
44C, rue de Bray

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:
AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde



