

## Sehnenplatzhalter (oval) nach Swanson-Hunter



Der Sehnenplatzhalter nach Swanson-Hunter ist ein Hilfsmittel, das vorübergehend implantiert, die zweiseitig durchgeführte Rekonstruktion der Handbeuge- und Handstrecksehnen erleichtert.

Der sterile Sehnenplatzhalter ist in 3 Längen von 12-22 cm erhältlich und hat einen ovalen Querschnitt.

Er ist in vier verschiedenen Größen erhältlich und wird aus Hochleistungs-Silikonelastomer in medizinischer Qualität hergestellt, mit einem geringen Anteil Bariumsulfat, um den Platzhalter röntgenkontrastfähig zu machen.

In Phase I wird der Platzhalter in das entsprechend rekonstruierte Sehnenlager eingelegt und an der distalen Phalanx befestigt; das proximale Ende bleibt frei auf der Handfläche oder auf dem Unterarm. Die zweite Operationsphase erfolgt in der Regel sechs Monate nach dem ersten Eingriff, nachdem sich eine ausreichende Pseudosehnen Scheide um den Platzhalter gebildet hat und das Handgelenk weich und geschmeidig ist. In Phase II wird dann ein permanentes Sehnenautograft am Platzhalter befestigt und durch die Pseudosehnen Scheide gezogen, wobei der Platzhalter entfernt wird. Spezifische Indikationen: Rekonstruktion der Beuge- und Strecksehnen der Finger, des Daumens und des Handgelenks. Vernarbungen oder Sehnenverwachsungen nach einem Trauma oder mißlungener Erstoperation, Fehlen der Sehnen Scheide, Vernarbungen oder Verwachsungen an funktionsgestörten Sehnenrollen.

<b>Kat.-Nr.</b>	<b>Abmessungen</b>	<b>Verpackungseinheit</b>
Z03120	Länge: 12 cm, Breite: 3 mm, Höhe: 1,5 mm	1 Stück
Z03180	Länge: 18 cm, Breite: 3 mm, Höhe: 1,5 mm	1 Stück
Z03220	Länge: 22 cm, Breite: 3 mm, Höhe: 1,5 mm	1 Stück
Z04120	Länge: 12 cm, Breite: 4 mm, Höhe: 2 mm	1 Stück
Z04180	Länge: 18 cm, Breite: 4 mm, Höhe: 2 mm	1 Stück
Z04220	Länge: 22 cm, Breite: 4 mm, Höhe: 2 mm	1 Stück
Z05120	Länge: 12 cm, Breite: 5 mm, Höhe: 2,5 mm	1 Stück
Z05180	Länge: 18 cm, Breite: 5 mm, Höhe: 2,5 mm	1 Stück
Z05220	Länge: 22 cm, Breite: 5 mm, Höhe: 2,5 mm	1 Stück
Z06120	Länge: 12 cm, Breite: 6 mm, Höhe: 3 mm	1 Stück
Z06180	Länge: 18 cm, Breite: 6 mm, Höhe: 3 mm	1 Stück
Z06220	Länge: 22 cm, Breite: 6 mm, Höhe: 3 mm	1 Stück